


Technisches Datenblatt

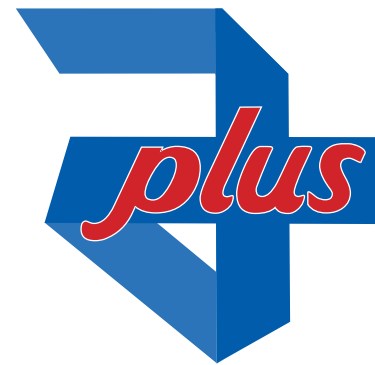

MaiMed® MyClean Flowpack VirusComplete

Desinfektionstücher mit Alkohol

- Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- Tränklösung wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid und viruzid
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Auftrocknen
- Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet

Anwendung:

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberfläche sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Im Lebensmittelbereich die Fläche anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen. Nur für den professionellen Gebrauch. Nach Gebrauch gut verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Ausführung:

MaiMed® MyClean Flowpack VirusComplete

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	28 x 30 cm	48 Blatt	79663	4046153124343	14006130	10 Pack
Desinfektionstücher	20 x 20 cm	80 Blatt	79763	4046153134588	16913234	12 Pack

Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der Tränklösung gem. EN-Normen und VAH	
Bakterizid, levurozid (gem. EN 16615 (4-Feldertest), ready-to-use-Tuchsystem: Bio Wipes; hohe Belastung):	1 Minute
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (gem. EN 13727/EN 13624), mykobakterizid, tuberkulozid (inkl. M.-avium & M.-terrae) (EN 144348; hohe Belastung):	30 Sekunden
Fungizid (A.-brasiliensis) (EN 14348; hohe Belastung):	5 Minuten
Viruswirksamkeiten	
Viruzid:	5 Minuten
Noro-/Adeno-/Polio-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	5 Minuten
SV40-Viren (DVV/RKI, mit 10 % FKS-Belastung):	1 Minute
Noro-/Adeno-Viren (prEN 16777; geringe Belastung):	1 Minute

Zusammensetzung: In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoffe: 63,5 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid.


Qualitätssicherung: VAH, Biozidverordnung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrenstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.



MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

Technisches Datenblatt

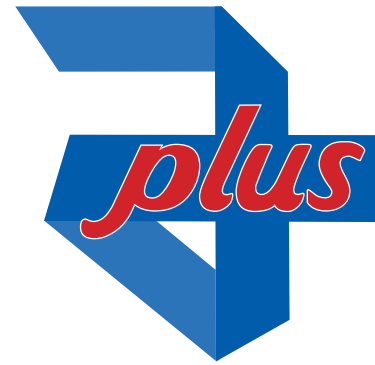

MaiMed[®] MyClean Flowpack VirusComplete

Desinfektionstücher mit Alkohol

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Biozid Reg. Nr.: N-96536

eClass: 30-30-01-02

Verwendbarkeit: 2 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:



MaiMed[®] GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de