


Technisches Datenblatt

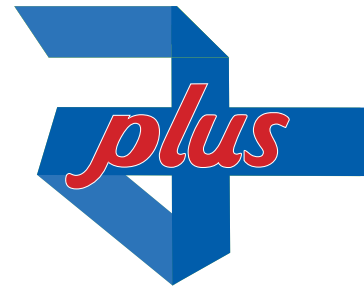

MaiMed® MyClean DS Wipes soft XXL

vorgetränkte Vliestuchrolle

Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen

Geeignet für den Lebensmittelbereich, kein Abspülen/Nachwischen erforderlich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

- Tränklösung wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid PLUS (gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und Corona-Viren (SARS-CoV-2 + VOC)
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Aldehyd- und QAV-frei (auch im Lebensmittelbereich)
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Tränklösung ist VAH-gelistet
- Tuchgröße: 29 cm x 29 cm

Anwendung:

Gebrauchsfertige, alkoholische, aldehyd- und QAV-freie Desinfektionstücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Für den professionellen Gebrauch. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Ausführungen:

MaiMed® MyClean DS Wipes soft XXL


Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	Neutral	70 Stück	79659	4046153121847	11519679	6 Rollen

Einwirkzeiten:

Wirksamkeiten für den Hygienebereich	
Bakterizid, levurozid (EN 16615; niedrige Belastung):	1 Minute
Bakterizid, levurozid (EN 13727, EN 13624; niedrige Belastung):	1 Minute
Mykobakterizid (EN 14348; hohe Belastung):	5 Minuten
Tuberkulozid (EN 14348; niedrige Belastung):	1 Minute
Wirksamkeiten für den Lebensmittelbereich	
Bakterizid (EN 1276; niedrige Belastung):	1 Minute
Levurozid (EN 1650; niedrige Belastung):	1 Minute
Viruzidie nach EN 14476	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Minute
Vaccinia-Viren (niedrige Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (niedrige Belastung):	1 Minute
Noro-Viren (niedrige Belastung):	1 Minute



Technisches Datenblatt

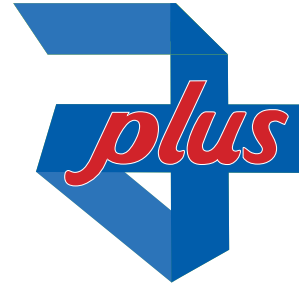

MaiMed® MyClean DS Wipes soft XXL

vorgetränkte Vliestuchrolle

Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoff: 50 g Ethanol

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP, Biozidverordnung
Medizinprodukt: Klasse IIa

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

UFI: 3K80-S0U9-C00D-YCCD

eClass: 30-30-01-02

Biozidnummer: N-99040

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:

CE MD   **UN 3175**

0482



Achtung



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MaiMed® MyClean DS Wipes soft XXL-2022-04